

Made by


BRIEGELDENTAL
Präzision braucht Qualität



Dublierform für Einmalgipsküvetten zur Herstellung / Dublierung feuerfester Stümpfe.

Für einfaches Stumpfdoublieren bei Verwendung eines Alveolen-(Geller-) Modells.

Mit dieser Silikonform lassen sich unbegrenzt viele Einmal-Gipsküvetten herstellen. Dadurch wird es irrelevant, wie viele Techniker gerade eine Küvette benötigen/benutzen.

Durch die Geometrie ist die Entnahme der Gipsküvetten sehr einfach, zugleich ist der spätere Verbleib des Silikons in der Gipsküvette, auch nach mehrmaliger Stumpfentnahme, dauerhaft gesichert.

Die Entnahme der Stümpfe ist schonend und simpel, egal ob dieses mit Gips, Einbettmasse oder Kunststoff ausgegossen werden.

Aufgrund der Reproduzierbarkeit der Küvette kann die Stumpfdoublierung zusammen mit der Küvette archiviert werden.

Made by

BRIEGELDENTAL
Präzision braucht Qualität



Bild 1
Silikonform vor der Beschickung mit Gips
(eventuell davor mit Vaselinespray
konditionieren)



Bild 2
Entnahme der ausgehärteten Roh-
Gipsküvette aus der Silikonform



Bild 3
mit einem Instrument werden die
vorgefertigten Retentionsfenster
durchstoßen

Made by


BRIEGELDENTAL
Präzision braucht Qualität

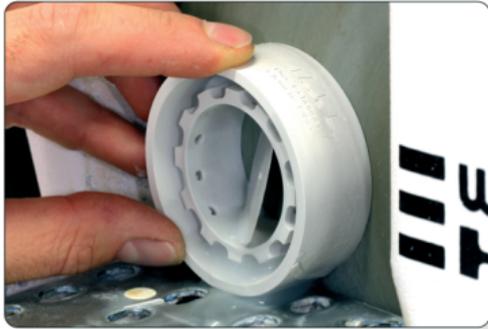


Bild 4
Betrimmen der Küvettenbasis bis der
Küvettenboden vollständig entfernt ist



Bild 5 und 6
die zu dublierenden Stümpfe und die
Gipsküvette werden auf einer
Tiefziehfolie oder dgl mit Wachs/
Knetmasse befestigt

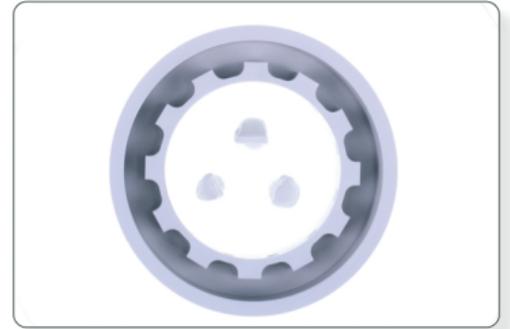


Bild 6

Made by

BRIEGELDENTAL
Präzision braucht Qualität



Bild 7
Befüllen der Kuvette mit Dubliersilikon
(Abbinden im Durcktopf)



Bild 8
einfache Entnahme der Stümpe durch
Druck von der Gegenseite



Bild 9
nach der Rückstellphase ist die Kuvette
bereit für Einbettmasse/Gips/
Kunststoffe und individuell archivierbar,
durch leichte Beschriftung am Rand.

Made by


BRIEGELDENTAL
Präzision braucht Qualität



Infos:

Made by Uwe Gehringer
Dentallabor
Frauenstraße 11
D-80469 München
Tel.: 089 26010086
Fax: 089 26010087
uwe@madeby-ug.com

Vertrieb:

BRIEGELDENTAL
David C. Briegel
Tegernseer Landstr. 2
82054 Sauerlach
Tel: 08104 88 96 90
Fax: 08104 628 77 33
info@briegeldental.de